

MATENTABEL

Let op: Neem uw maat op terwijl u het verband draagt om de juiste pasvorm te garanderen

	SMALL	LARGE
COMFORT COVERUP™ OVERKOUS ARM		
Grootste armotrek met verband	26cm - 39cm	40cm - 60cm
COMFORT COVERUP™ OVERKOUS BD		
Grootste kuitotrek met verband	34cm - 50cm	51cm - 80cm
COMFORT COVERUP™ OVERKOUS BG		
Grootste dijbeenotrek met verband	50cm - 71cm	72cm - 108cm

De **Comfort CoverUp™** overkous is ook op maat leverbaar wanneer de hierboven genoemde bereiken niet volstaan. Neem contact op met Varitex NV, tel. +31 (0)23 531 93 17 of mail naar sales@varitex.nl www.varitex.nl

VARITEX IS EEN ERKENDE DISTRIBUTEUR VAN CIRCAID MEDICAL PRODUCTS, INC.

VARITEX
COMPETENCE IN COMPRESSION

Varitex NV, Postbus 723, 2003 RS Haarlem | +31(0) 23 531 93 17 | sales@varitex.nl | www.varitex.nl

DU-CCU-IN-092010-01



COMFORT COVERUP™

U kunt de **Comfort CoverUp™** overkous over elk verband dragen. Het gladde oppervlak voorkomt dat uw verband gaat schuren of irriteren tegen andere delen van uw lichaam, en hij haakt niet vast aan andere stoffen. De **Comfort CoverUp™** overkous is ook prima onder uw kleding te dragen.

De **Comfort CoverUp™** overkous bevat: nylon en spandex.

DIT PRODUCT BEVAT GEEN LATEX.

De **Comfort CoverUp™** heeft geen therapeutische werking. Circaid Medical Products, Inc. is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van onze producten. Circaid is een geregistreerd handelsmerk. Comfort CoverUp is een handelsmerk van Circaid Medical Products, Inc. Varitex is een erkende distributeur van Circaid Medical Products, Inc.

©2010 Circaid Medical Products, Inc. Alle rechten voorbehouden.



MATENTABEL

Let op: Neem uw maat op terwijl u het verband draagt om de juiste pasvorm te garanderen

	SMALL	LARGE
COMFORT COVERUP™ OVERKOUS ARM		
Grootste armotrek met verband	26cm - 39cm	40cm - 60cm
COMFORT COVERUP™ OVERKOUS BD		
Grootste kuitotrek met verband	34cm - 50cm	51cm - 80cm
COMFORT COVERUP™ OVERKOUS BG		
Grootste dijbeenotrek met verband	50cm - 71cm	72cm - 108cm

De **Comfort CoverUp™** overkous is ook op maat leverbaar wanneer de hierboven genoemde bereiken niet volstaan. Neem contact op met Varitex NV, tel. +31 (0)23 531 93 17 of mail naar sales@varitex.nl www.varitex.nl

VARITEX IS EEN ERKENDE DISTRIBUTEUR VAN CIRCAID MEDICAL PRODUCTS, INC.

VARITEX
COMPETENCE IN COMPRESSION

Varitex NV, Postbus 723, 2003 RS Haarlem | +31(0) 23 531 93 17 | sales@varitex.nl | www.varitex.nl

DU-CCU-IN-092010-01

COMFORT COVERUP™

U kunt de **Comfort CoverUp™** overkous over elk verband dragen. Het gladde oppervlak voorkomt dat uw verband gaat schuren of irriteren tegen andere delen van uw lichaam, en hij haakt niet vast aan andere stoffen. De **Comfort CoverUp™** overkous is ook prima onder uw kleding te dragen.





De **Comfort CoverUp™** overkous bevat: nylon en spandex.

DIT PRODUCT BEVAT GEEN LATEX.

De **Comfort CoverUp™** heeft geen therapeutische werking. Circaid Medical Products, Inc. is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van onze producten. Circaid is een geregistreerd handelsmerk. Comfort CoverUp is een handelsmerk van Circaid Medical Products, Inc. Varitex is een erkende distributeur van Circaid Medical Products, Inc.

©2010 Circaid Medical Products, Inc. Alle rechten voorbehouden.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN:

-  MACHINEWASBAAR
-  MAG IN DE DROGER
-  NIET STRIJKEN
-  NIET BLEKEN

Uw **Comfort CoverUp™** overkous gaat langer mee als u hem op de hand wast en nat laat drogen, hangend of liggend. U mag de **Comfort CoverUp™** overkous ook met een speciaal programma en bij lage temperatuur in de machine wassen en drogen.





We raden u aan om de **Comfort CoverUp™** overkous in een waszak of kussensloop te wassen om te voorkomen dat ander wasgoed vastplakt aan de **Comfort CoverUp™** overkous.

GEbruIKSVOORSCHRIFTEN:

AANTREKKEN: zorg dat alle klittenbanden van uw verband goed zijn vastgemaakt. Er mogen geen haakjes meer uit de kleding steken. Schuif de **Comfort CoverUp™** overkous over uw verband.

UITTREKKEN: schuif eerst de **Comfort CoverUp™** overkous van uw arm of been voordat u het verband uittrekt.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN:

-  MACHINEWASBAAR
-  MAG IN DE DROGER
-  NIET STRIJKEN
-  NIET BLEKEN

Uw **Comfort CoverUp™** overkous gaat langer mee als u hem op de hand wast en nat laat drogen, hangend of liggend. U mag de **Comfort CoverUp™** overkous ook met een speciaal programma en bij lage temperatuur in de machine wassen en drogen.

We raden u aan om de **Comfort CoverUp™** overkous in een waszak of kussensloop te wassen om te voorkomen dat ander wasgoed vastplakt aan de **Comfort CoverUp™** overkous.

GEbruIKSVOORSCHRIFTEN:

AANTREKKEN: Zorg dat alle klittenbanden van uw verband goed zijn vastgemaakt. Er mogen geen haakjes meer uit de kleding steken. Schuif de **Comfort CoverUp™** overkous over uw verband.

UITTREKKEN: Schuif eerst de **Comfort CoverUp™** overkous van uw arm of been voordat u het verband uittrekt.