

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT:



ALLEEN HANDWAS



HANGEND OF LIGGEND DROGEN



NIET MACHINE WASBAAR



NIET IN DE DROGER DOEN



NIET STRIJKEN



GEBRUIK GEEN BLEEKMIDDELEN



NIET STOMEN

Aangeraden wordt de Comfort Non-Slip Liner™ met de hand te wassen en drogen. Vanwege de aard van het materiaal zullen er pluizen aan gaan plakken. Gebruik een pincet om de pluizen te verwijderen, deze worden niet middels wassen verwijderd. De pluizen zijn op termijn niet van invloed op het effect van het materiaal.



Dit product dient niet te worden gebruikt door kinderen jonger dan 6 jaar.

Materiaalcomponenten van de anti-slip band zijn polyestervezels met bindmiddelen. Dit product bevat geen latex. CircAid Medical Products, Inc. neemt geen verantwoordelijkheid voor verwondingen of schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik van onze producten. CircAid is een geregistreerd handelsmerk, Comfort™ anti-slip band is een handelsmerk van CircAid Medical Products, Inc. ©2010 CircAid Medical Products, Inc. Alle rechten zijn voorbehouden.

CIRCAID®

COMFORT
NON-SLIP LINER™

De **Comfort Non-Slip Liner™** wordt rechtstreeks op de huid gedragen, onder een bandage. Het kleverige oppervlak helpt afzakken te voorkomen.

VARITEX IS EEN ERKENDE DISTRIBUTEUR VAN CIRCAID MEDICAL PRODUCTS, INC.

VARITEX
COMPETENCE IN COMPRESSION

Varitex NV. Postbus 723, 2003 RS Haarlem | +31(0) 23 531 93 17 | sales@varitex.nl | www.varitex.nl

GEBRUIKSAANWIJZING:

HET KNIPPEN VAN DE
COMFORT NON-SLIP LINER™ ANTI-SLIP BAND
(voor het gebruik in combinatie met uw
Juxta-Fit™ verband)





STAP 1. Vouw de anti-slip band open en plaats deze plat op een harde ondergrond. Zorg dat de ondergrond schoon is aangezien het materiaal vuil en materiaal aantrekt. Rol de Juxta-Fit banden uit. Plaats het verband, of deel ervan (bijvoorbeeld alleen het bovenbeen gedeelte) plat op de anti-slip band met de zwarte kant boven.

Let op: Zorg ervoor dat het klittenband niet in contact komt met de anti-slip band. De haken van het klittenband kunnen de anti-slip band beschadigen en de vezels van de anti-slip band zullen de effectiviteit ervan aantasten.

STAP 2. Gebruik het verband als een sjabloon. Knip een rechte lijn door de anti-slip band, zie tekening stap 2. Gebruik de uiteinden van de banden als richtlijn.

Let op dat u niet in het verband knipt, waardoor de garantie onmiddellijk vervalt.

STAP 3. Indien nodig, knip overtollig materiaal aan de boven- en onderkant van de anti-slip band af.

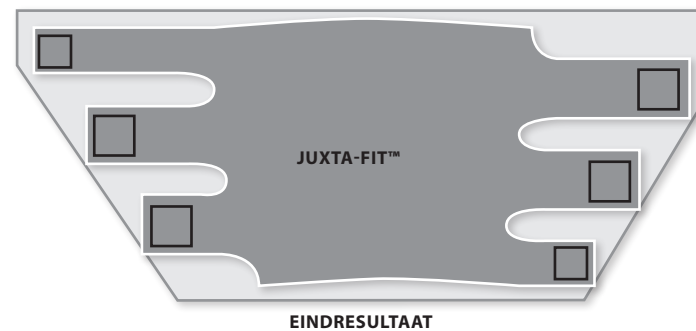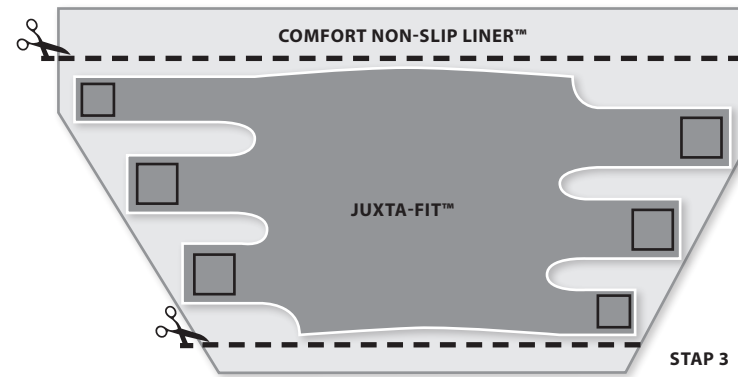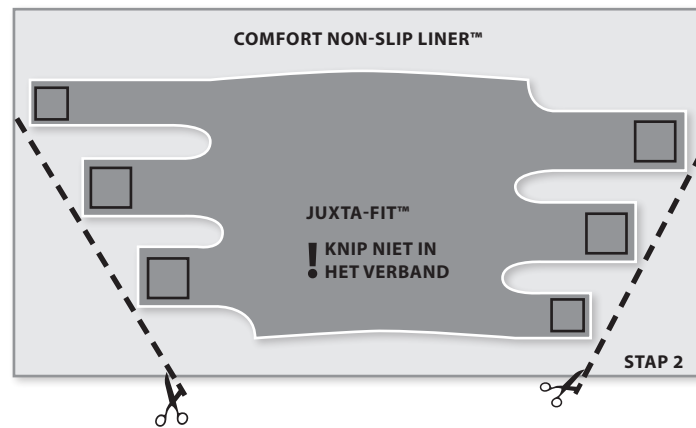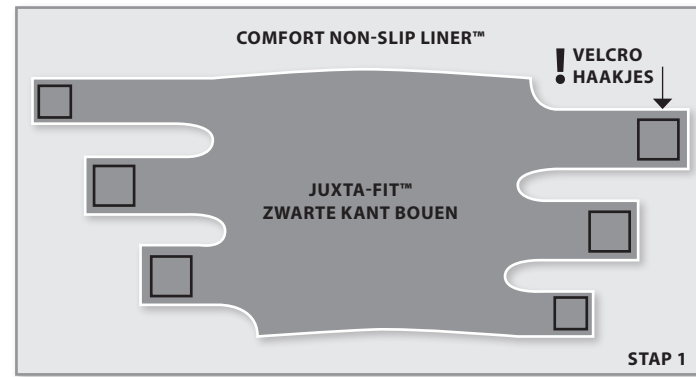


HET KNIPPEN VAN DE
COMFORT NON-SLIP LINER™ ANTI-SLIP BAND
(OP BASIS VAN OMVANGSMATEN)

STAP 1. Meet de hoogte van het gewenste gebied van de ledemaat.

Let op: de maximale hoogte van de dekking is 46 cm.

STAP 2. Meet de grootste en laagste omvang van de ledemaat. Tel bij elke meting 25 cm erbij voor een perfecte overlap van de anti-slip band.

STAP 3. Deze drie metingen markeren en knip de anti-slip band volgende de tekening hieronder.

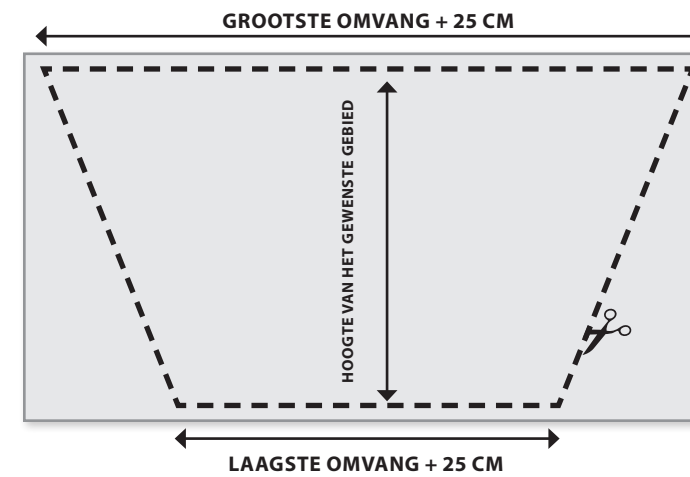

HET AANLEGGEN VAN DE
COMFORT NON-SLIP LINER™ ANTI-SLIP BAND

Leg de anti-slip band om dat gedeelte van de ledemaat waar het CircAid verband komt te zitten (bijv. het bovenbeen)

De anti-slip band moet direct op de huid worden gedragen; het werkt niet in combinatie met een onderkous.

Laat de anti-slip band aan de voorkant van de ledemaat overlappen om deze vast te zetten. De anti-slip band plakt vanzelf; plakband of dergelijke is niet nodig!

Leg het CircAid verband over de anti-slip band aan. Let goed op dat de klittenbanden niet vastplakken aan de anti-slip band. De klittenbanden mogen uitsluitend op het CircAid verband vastgeplakt worden.

Plakt men het klittenband op de anti-slip band dan kan dit schade hieraan veroorzaken en neemt de effectiviteit van het klittenband af.



COMFORT NON-SLIP LINER™ MET JUXTA-FIT™ VERBAND