

installatieprocedure USB- naar- serieel kabel voor Lympha Press Plus

1. Installeer het Lympha Press Plus programma op uw PC/Laptop.
!!! LET OP !!! indien u Windows Vista Home Edition of Windows 7 heeft, installeer eerst de driver "PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210".
2. Maak de Lympha Press Plus gereed voor gebruik (stekker in stopcontact, luchtslangen en manchet aansluiten)
3. Sluit de standaard bijgeleverde seriële kabel aan op de Lympha Press Plus .
4. Sluit de **USB TO SERIAL CABLE** aan op de seriële kabel enerzijds en de computer/laptop anderzijds
5. Indien de computer een automatische installatieprocedure uitvoert, volg dan de instructies
6. Na de installatie van de USB TO SERIAL CABLE dient u de juiste COM poort op te geven:
 - a. ga naar het **configuratie scherm**
 - b. dubbelklik op **stelsysteem**
 - c. het pop-up menu **stelsysteemeigenschappen** verschijnt
 - d. selecteer de tab **hardware**
 - e. dubbelklik op **apparaatbeheer**
 - f. selecteer **Poorten (COM & LPT)**
 - g. er verschijnt nu **Prolific USB-to-Serial Bridge (Com...)**
het nummer van de COM poort dient 4 of lager te zijn. Zoniet, vervolg met:
 - i. dubbelklik op **Prolific USB-to-Serial Bridge**
 - ii. selecteer de tab **Poortinstellingen**
 - iii. dubbelklik op **Geavanceerd**
 - iv. selecteer een vrije poort nr 1,2,3 of 4
7. Sluit de installatie af.
8. Start het **Lympha Press Plus programma**.
9. klik op **Com Select**
10. **Selecteer de COM poort** die u hebt opgegeven bij 6.g.iv
11. Klik op **Apply** en vervolgens op **OK**.